

OTEC Deventer is een erkend orthopedisch instrumentmakerij dat lichaamsgebonden hulpmiddelen aanmeet, vervaardigt en verstrekt. Eén van deze hulpmiddelen is de CTI, een maatwerk knieorthese.



Indicaties

- Instabiele voorste kruisbanden, instabiele achterste kruisbanden, letsel aan de mediale collaterale band, letsel aan de laterale collaterale band.
- Activiteiten met een zwak, medium of zwaar contact/impact.

Waarschuwing

Deze kniebrace is slechts een ondersteunende brace die niet bedoeld is om knieletsel te voorkomen. Het gebruik van dergelijk apparaat kan gepaard gaan met diverse vormen van huidirritatie, zoals huiduitslag en drukpunten. Als u tijdens het gebruik van dit product ongewone reacties ondervindt, raadpleegt u ons direct.

Gebruik van de brace

- Maak alle banden aan de buitenzijde van de brace los.
- Plaats de brace, met de knie ongeveer 90 graden gebogen, over uw knie zodat de patella mooi tussen de condylum vulstukken ligt. Opmerking: op die manier ligt het scharnier boven de gewrichtslijn zodat de brace goed zit wanneer u rechtop staat.
- Bevestig de band goed boven de kuitspier, vanaf de riem net onder de knie (de lagere gekruiste band). Dit helpt de brace ondersteunen. Opmerking: Alle banden kunnen worden afgesneden of in lengte worden aangepast.
- Maak de onderste band vervolgens stevig vast door deze door de D-vormige ring te voeren.
- Ga door met de band net boven de knie (hogere gekruiste band) en vervolgens met de bovenste band. Snoer de beide banden goed vast. Opmerking: als de twee bovenste banden te sterk worden aangehaald kan de brace zich verplaatsen.



Reinigen

- Voeringen, banden en bandvulstukken mogen voor reiniging worden verwijderd.
- Niet in de wasmachine wassen.
- Niet in de droger drogen.
- Met de hand wassen met een niet-agressieve zeep zonder wasmiddelen (30°C).
- Grondig spoelen.
- Aan de lucht laten drogen.
- In geval van verschuiving, de voeringen met een alcoholdoekje of een vochtig doekje reinigen.
- Als de brace in zout water of chloorwater is gebruikt, de brace grondig spoelen en aan de lucht laten drogen.

Onderhoud van het scharnier

- Het scharnier niet zelf demonteren.
- Regelmatig nakijken op de aanwezigheid van verontreinigingen, zoals vuil of gras.
- Verwijder voorzichtig vuil in uit het scharnier met leidingwater of perslucht.
- Met siliconen spray of droog grafiet smeren indien nodig.