



OTEC Deventer is een erkend orthopedisch instrumentmakerij dat lichaamsgebonden hulpmiddelen aanmeet, vervaardigt en verstrekt. Eén van deze hulpmiddelen is de ryno lacer, een confectie hand-pols-orthese.

Gebruiksrichtlijnen

Uw behandelend arts is degene die u de orthese voorschrijft en bepaalt de behandelduur. De voorgeschreven dagelijkse gebruiksduur dient nauwkeurig nageleefd te worden. Controleer regelmatig de conditie van de huid, of er zich geen drukplekken of andere irritaties vormen. In dat geval dient u contact op te nemen met uw arts of instrumentmaker. De orthese mag enkel voor de daarvoor bedoelde behandeling bij een enkele patiënt ingezet worden.

Beoogd gebruik van het product / indicatie

De Wrist Lacer™ orthese is bedoeld als ondersteuning bij polsklachten en is zowel geschikt voor conservatieve als ook voor postoperatieve behandeling. De polsorthese wordt speciaal voor gebruik rondom de pols bij de onderstaande indicaties ingezet:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| ▪ Weke delen irritatie | ▪ Reumatische artritis |
| ▪ Verstuingen | ▪ Radiale parese |
| ▪ Carpaal tunnel syndroom | ▪ Distorsie |
| ▪ Medianuscompressiesyndroom | |

Overige voorwaarden / toepassingen

De polsorthese mag niet gedragen worden in zout water.

Bestaande gebruikersrisico's en contra-indicaties

Er zijn geen risico's dan wel contra-indicaties bekend.

Onderhoudsadvies

Controleer het haakklittenband regelmatig op vervuiling door stofjes en draadjes van andere kledingstukken om een goede hechting te garanderen.

Aantrek instructies

- Neem de orthese uit de verpakking en open de klittenbanden van de orthese
- Trek de orthese aan als een handschoen door deze over uw hand te schuiven (A)
- De metalen balein dient aan de binnenzijde tegen de handpalm aan te liggen
- Sluit nu de klittenband om de duim op de gewenste spanning en zet deze vast aan het lusmateriaal (B)
- Pak vervolgens het brede klittenbanddeel, wat aan het vetersysteem vast zit en trek dit circulair om de pols en maak zodoende de orthese vast op de gewenste spanning (C)
- De orthese dient zo gesloten te worden dat het polsgewricht en middenhandsbeneden ondersteund zijn maar er geen drukplekken kunnen ontstaan

Indien zich drukplekken vormen of bij optredende pijn dient u contact op te nemen met uw arts of instrumentmaker.

Gebruikte materialen

Materiaal: geperforeerd kunststof suède met een polypropyleen vilt voering en nylon baleinhoesjes en nikkelvrije veterogen.

Reinigingsvoorschriften

Sluit voor het wassen alle klittenbanden ter voorkoming van beschadigingen aan andere kledingstukken en voor een optimale hechting van de klittenbanden.

LET OP: controleer het haakklittenband regelmatig op vervuiling door stofjes en draadjes van andere kledingstukken.

