

OTEC Deventer is een erkend orthopedisch instrumentmakerij dat lichaamsgebonden hulpmiddelen aanmeet, vervaardigt en verstrekt. Eén van deze hulpmiddelen is het korset.

Afhankelijk van uw aandoening, de klachten en andere factoren wordt in overleg met u, uw medisch specialist en één van onze orthopedisch technologen het best bijpassende korset geselecteerd. Dit kan een korset zijn die fabrieksmatig geproduceerd is of op maat wordt gemaakt.

Indicatie en functie van het korset

Korsetten kunnen aangemeten worden voor tijdelijk of permanent gebruik. Dit is afhankelijk van de indicatie die de medisch specialist heeft gesteld.

Een opsomming van een aantal indicaties voor het gebruik van een elastisch (maat)korset:

- Artrose
- Chronisch pijnsyndroom
- Discopathie
- Hernia
- Osteoporose
- Scoliose

Vaak wordt er voor een fabrieksmatig vervaardigd *confectie korset* gekozen wanneer de aandoening tijdelijk van aard is en wordt er voor een (elastisch) *maatkorset* gekozen wanneer de aandoening chronisch van aard is.

Functies van het korset

Wij werken veelal met elastische korsetten. Deze geven circulaire druk op de romp waardoor:

- De wervelkolom wordt gestabiliseerd
- De wervels en tussenwervelschijven worden ontlast
- De rug wordt gecorrigeerd bij vormafwijkingen

Orthopedische confectie korsetten

Fabrieksmatig vervaardigde korsetten, ook wel confectie korset genoemd, bestaan in verschillende maten en uitvoeringen. Door het meten van een aantal lichaamsmaten kunnen we een passend korset bestellen of direct uit de voorraad leveren. Bij de levering wordt het op het korset op uw lichaam aangepast en indien nodig worden er kleine wijzigingen aangebracht.



Elastisch maatkorset

Een elastisch maatkorset is een individueel vervaardigde voorziening, welke handmatig wordt geproduceerd op basis van de maten die met behulp van een lintmeter zijn gemeten.

Maatname

Om de maten nauwkeurig te kunnen meten vragen wij u voor de maatname om uw bovenkleding uit te trekken. Graag uw begrip hiervoor. De hoogte- en omvangsmaten worden door een orthopedisch technoloog gemeten en genoteerd op het maatformulier. Vervolgens ontvangt onze bandagist het formulier en wordt er op basis van de gemeten maten een patroon op papier uitgetekend.

Dit patroon wordt uitgetekend op de geselecteerde stof. Hieruit volgt een paskorset.



Pasfase

Na de maatname wordt er een afspraak gemaakt voor het passen van het korset.

Tijdens deze afspraak worden de pasvorm, de sluiting en de hoogte van het korset gecontroleerd. Indien nodig worden er met potlood markeringen aangebracht ter verbetering van het korset.

Na afloop maken we een afspraak voor de definitieve levering van het korset.

Levering definitieve korset

Tijdens deze afspraak krijgt u uitleg over het gebruik en onderhoud van het korset en mag u het korset mee naar huis nemen.

Het bovenstaande proces, van het maatnemen tot het afleveren van het korset, neemt 2 tot 3 weken in beslag.

Aantrek-instructies

Bij het aantrekken van uw korset dient u op de volgende punten te letten.

- Het is aan te raden om onder uw korset een katoenen onderhemdje zonder naden te dragen. Het is wenselijk het onderhemdje nauw aansluit op het lichaam, zodat het niet plooit en er geen onnodig drukplekjes en/of irritatie ontstaat.
- Zorg dat uw korset strak om uw lichaam zit. Dit is nodig wil het korset voldoende kunnen functioneren en op zijn plek blijven zitten. Bij de aflevering van het korset geeft een van onze medewerkers u hier informatie over. Als geheugensteuntje volgt hieronder nogmaals een beschrijving van de aantrek-instructies.

Tip 1: bij het aantrekken van het korset is het wenselijk dat de flexibele baleinen die in het rugpand zijn verwerkt naast de uitsteeksels van de wervelkolom worden gepositioneerd.

Tip 2: u kunt controleren of het korset op de juiste hoogte zit door te kijken of het onderste deel van het korset halverwege de bil eindigt en enkele centimeters onder de borst blijft.

Tip 3: bij het aantrekken van het korset sluit u altijd eerst bij de onderste band. Sluit vervolgens de vervolgens de daaropvolgende banden. De banden hoeven niet in een keer op de juiste spanning te worden aangetrokken. Dit mag gerust stapsgewijs gebeuren.

Reiniging



Wanneer u het korset geregeld draagt, is het belangrijk om het korset regelmatig schoon te maken. Indien het korset voorzien is van een klittenbandsluiting is het raadzaam deze te sluiten alvorens u het korset gaat wassen. Hierdoor blijft de kleefkracht van het klittenband behouden. Was het korset met de hand in handwarm water dat voorzien is van een neutraal of fijnwasmiddel. Spoel na het wassen het korset goed uit met schoon water, rol het eventueel in een handdoek om het drogen te versnellen en laat het vervolgens liggend drogen.

Bedenkt u zich dat wanneer u het korset overmatig wast, dit niet ten goede komt van het behoud van de kwaliteit van de materialen. Het dragen van een hemdje onder het korset maakt dat u het korset minder vaak hoeft te wassen.

Doe een korset nooit in de wasmachine of wasdroger.

Levensduur

Gemiddeld genomen gaat een elastisch maatkorset twee jaar mee. Bij het gebruik van een confectioneel korset gaat deze gemiddeld één tot twee jaar mee.

Tot besluit

Heeft u vragen over het korset, een tip, een klacht of een compliment? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u telefonisch advies geven of een afspraak maken voor het controleren, corrigeren of repareren van het korset. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 en 17.00 uur en vrijdag tot 11.30 uur.